

Dispositivo Intracavitário Vaginal para Contração Perineal

PelviFit

LITE

Eletrodo Intracavitário Vaginal para Eletromiografia e Eletroestimulação

- Novo design anatômico
- Maior facilidade para movimentos funcionais
- Melhor superfície de contato
- Efetivo para tratamento das disfunções do assoalho pélvico

*VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE COM O SEU EQUIPAMENTO



*Para saber mais
Acesse nossa loja!*


Miotec
Conectando Tecnologia
ao Movimento Humano

10
UNIDADES

O eletrodo intracavitário vaginal PelviFit Lite é utilizado para realizar a captação do sinal de eletromiografia e biofeedback ou em situações nas quais se necessite a estimulação muscular da região do perineo. Os eletrodos foram desenvolvidos com alto padrão de qualidade, apresentando um design anatômico onde o fio possui uma proteção flexível em sua base – dificultando danos ao material e garantindo maior liberdade nos movimentos. São confeccionados em plástico ABS e possuem contatos metálicos em aço inoxidável. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado como suprimento dos sistemas de biofeedback de EMG e estimulação muscular, devidamente aprovados de acordo com a norma EN60601-01.

INDICAÇÕES DE USO

Deve ser utilizado em um único paciente, sendo descartado após o uso. Embora possa ser introduzida no canal anal, devido a sua anatomia, possui uma maior efetividade de utilização no canal vaginal. Não é destinado ao uso simultâneo nos dois canais. Recomenda-se, antes da sua utilização, uma prescrição de um profissional de saúde.

CONTRAINDICAÇÕES DE USO


- Se a embalagem estiver violada;
- Se estiver em pós-cirúrgico;
- Com lesões no tecido;
- Em período menstrual;
- Em pacientes com marca-passo, no caso de estimulação elétrica;
- Caso a paciente sinta algum desconforto, alergia ou irritação na pele.

DESCARTE

Os eletrodos PelviFit Lite são descartáveis e de uso individual. Os produtos são previamente higienizados com álcool isopropílico e após o uso devem ser descartados em lixo hospitalar. Qualquer tentativa de imersão em líquido pode comprometer o funcionamento do eletrodo.

INSTRUÇÕES DE USO

Certifique-se de que a embalagem está intacta e selada antes de abri-la, e então, rasgue horizontalmente a parte de cima. Abra o “ziplock” da embalagem individual e higienize o eletrodo com algodão e álcool isopropílico (a imersão do eletrodo em qualquer tipo de líquido pode danificar a mesma). Aplique gel condutor sobre a superfície do eletrodo, facilitando a introdução no canal vaginal e a condução do sinal elétrico. Lembre-se de inserir e posicionar o eletrodo com o equipamento desligado. Nunca movimente a sonda através dos cabos, utilize o anel que se encontra na parte posterior. O anel não deve ser introduzido no canal vaginal e deverá sempre permanecer no lado externo. As partes metálicas devem ser introduzidas e posicionadas em contato com as paredes laterais do orifício. Lave com água corrente e descarte após o uso.

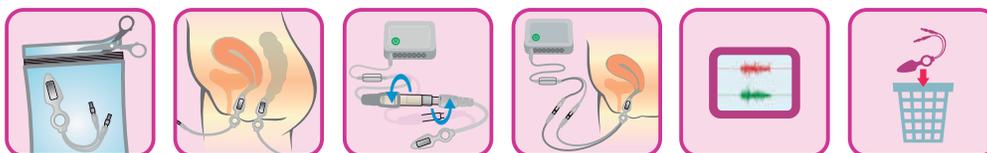

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Os eletrodos PelviFit Lite são acondicionados em embalagens plásticas individuais de 90mm x 160mm;
- As dimensões do eletrodo são: 83mm x 22mm;
- Material ABS de alta resistência mecânica;
- Contatos metálicos em aço inoxidável;
- Peso: 20g.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Os eletrodos intracavitários vaginal PelviFit Lite foram desenvolvidos para utilização junto aos eletromiógrafos da Miotec, podendo ser utilizados em equipamentos de eletroestimulação com certificado de avaliação em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 válido. Consultar a Miotec para verificar a necessidade de cabo adaptador para a utilização do produto.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO


Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após o uso e mantenha na embalagem original.

GARANTIA E VALIDADE

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.



Uso individual

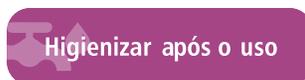

Higienizar após o uso



Não reprocessar



Descartar em
lixo hospitalar

A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto. Os eletrodos devem ser utilizados e descartados conforme as instruções desta embalagem.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21 **Endereço:** Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis – CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS
loja.miotec.com.br

Responsável Técnico: Fabiano Pires Ergoni
CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351690007