

Dispositivo Educador Vaginal

PelviFit Trainer

Comfort

Educador Perineal

Fácil de visualizar - Com 3 ângulos de rotação e 2 antenas

Monitoramento da evolução do tratamento

Super leve - com apenas 30g

Material em silicone à prova d'água

Cada educador acompanha uma bag de veludo!

Perfeito para você presentear e surpreender suas pacientes!



*Para saber mais
Acesse nossa loja!*

INDICAÇÕES DE USO

Recomendado para mulheres que desejam melhorar a função do assoalho pélvico. Utilizado para visualizar se a musculatura do assoalho pélvico está sendo contraída de forma correta através do movimento da antena conectada ao educador.

CONTRAINDICAÇÕES DE USO

Não utilizar se a embalagem estiver violada, em pacientes gestantes, com lesões no tecido do assoalho pélvico ou em período menstrual. Não utilizar no ânus ou sem a recomendação e o acompanhamento de um profissional habilitado. Não utilizar caso a paciente sinta algum desconforto, alergia ou irritação na pele.


PREPARAÇÃO

Verificar se a embalagem está intacta antes de abri-la, recortar a embalagem de esterilização e higienizar o produto. Posicionar a paciente sentada ou deitada. Utilizar gel lubrificante se necessário.


HIGIENIZAÇÃO

Limpar com água e sabão ou detergente enzimático. Secar com toalha ou pano seco.


MONTAGEM DO PELVIFIT TRAINER COMFORT

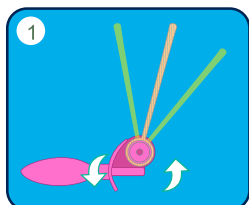

Selecionar o ângulo escolhido

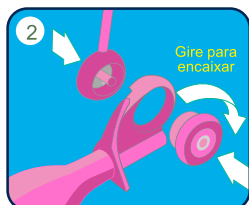

Conectar a antena ao anel fixador

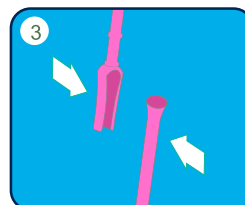

Conectar a haste extensora da antena


UTILIZAÇÃO

Solicitar à paciente que mantenha o corpo relaxado. Introduzir o educador segurando pelo anel de base. O anel de base não deve ser introduzido na vagina e a antena deve estar visível para a paciente. Exercitar e observar as contrações. Retirar o educador segurando-o pelo anel.


OBSERVANDO A CONTRAÇÃO

Observar o movimento da antena à medida que as contrações são realizadas. O movimento da antena para baixo indica que a contração está correta. A ausência de movimento da antena pode indicar que o posicionamento do educador está incorreto ou que a musculatura pélvica está frágil, exigindo um tratamento mais específico e de fortalecimento.

Observe a figura ao lado:

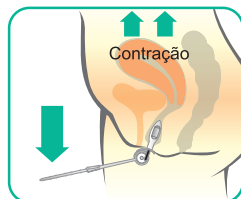

Sentido correto

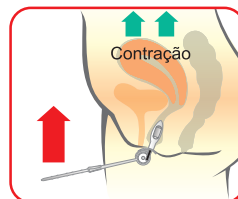

Sentido incorreto

CARACTERÍSTICAS

Design anatômico, de perfeito encaixe na parede da vagina. Dimensões do educador: 97,5mm x 22mm. Dimensões da antena: 106,5mm. Produto higienizado através de álcool isopropílico. O produto possui três partes: corpo do educador, que será introduzido no assoalho pélvico; antena, para visualização da contração e anel de base para posicionamento da antena e manuseio do educador.

DESCARTE

Os educadores PelviFit Trainer Comfort são de uso individual. Após a utilização, higienizar com pano umedecido e armazenar. Pode ser imerso em líquido. Caso deseje descartar utilize lixo hospitalar.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após o uso e mantenha na embalagem original.


GARANTIA E VALIDADE

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia.

O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.



Uso individual

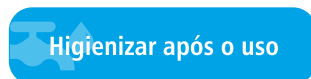

Higienizar após o uso



Não reprocessar



Descartar em lixo hospitalar

A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto. O educador deve ser utilizado e descartado conforme as instruções desta embalagem.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21 **Endereço:** Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis – CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS
loja.miotec.com.br

Responsável Técnico: Fabiano Pires Ergoni
CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351690007