

Dispositivo Educador Vaginal

PelviFit⁺ Plus

Trainer

Educador Perineal com Eletrodo Intracavitário

Fácil de visualizar - 3 ângulos de rotação e 2 antenas!

Dupla função: biofeedback visual ativo e passivo da contração muscular

Melhoria da propriocepção muscular do canal vaginal

Super leve - com apenas 23g!

*VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE COM O SEU EQUIPAMENTO



*Para saber mais
Acesse nossa loja!*


Miotec
Conectando Tecnologia
ao Movimento Humano

05
UNIDADES

INDICAÇÕES DE USO

Recomendado para mulheres que desejam melhorar a função do assoalho pélvico. Utilizada para visualizar se a musculatura do assoalho pélvico está sendo contraída de forma correta através do movimento da antena conectada ao educador e através do auxílio de equipamentos de eletromiografia ou eletroestimulação.

CONTRAINDICAÇÕES DE USO

Não utilizar se a embalagem estiver violada, em pacientes gestantes, com lesões no tecido muscular do assoalho pélvico ou em período menstrual. Não utilizar no ânus ou sem a recomendação e o acompanhamento de um profissional habilitado. Não utilizar caso a paciente sinta algum desconforto, alergia ou irritação na pele.


PREPARAÇÃO

Verificar se a embalagem está intacta antes de abri-la, recortar a embalagem de esterilização e higienizar o produto. Posicionar a paciente sentada ou deitada. Utilizar gel lubrificante se necessário.

HIGIENIZAÇÃO

Limpar com água e sabão ou detergente enzimático. Secar com toalha ou pano seco.


MONTAGEM DO PELVIFIT TRAINER PLUS

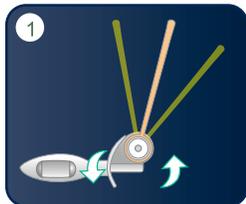

Selecionar o ângulo escolhido



Conectar a antena ao anel fixador

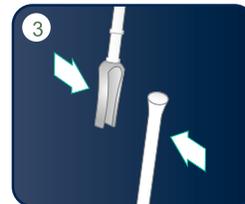

Conectar a haste extensora da antena


UTILIZAÇÃO

Solicitar que a paciente que mantenha o corpo relaxado. Introduzir o educador segurando-o pelo anel de base. O anel de base não deve ser introduzido na vagina e a antena deve estar visível para a paciente, e então conectar o educador ao equipamento de eletromiografia ou eletroestimulação. Com o eletromiógrafo, observar na tela do software a resposta elétrica do músculo intravaginal, junto ao biofeedback visual através da antena. Com o eletroestimulador, estimular a musculatura através das ondas elétricas e observar as contrações juntamente ao biofeedback visual através da antena. Ao terminar a utilização, desligue o aparelho, desconecte o educador e retire segurando-o pelo anel de base.


OBSERVANDO A CONTRAÇÃO

Observar o movimento da antena à medida que as contrações são realizadas. O movimento da antena para baixo indica que a contração está correta. A ausência de movimento da antena pode indicar que o posicionamento do educador está incorreto ou que a musculatura pélvica está frágil, exigindo um tratamento mais específico e de fortalecimento.

Observe a figura ao lado:

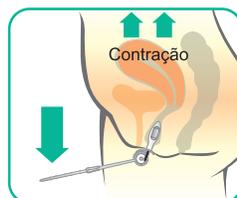

Sentido correto

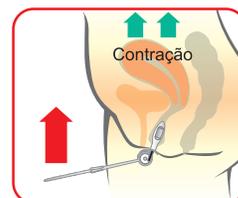

Sentido incorreto

CARACTERÍSTICAS

Design anatômico, de perfeito encaixe na parede interna da vagina. Dimensões do educador: 10cm x 3cm x 2cm. Dimensões da antena: 106,5 mm. O produto possui 3 partes: corpo do educador, que será introduzido no assoalho pélvico, antena, para visualização da contração e anel de base para posicionamento da antena e manuseio do educador. Produto higienizado através de álcool isopropílico.

DESCARTE

Os educadores PelviFit Trainer Plus são de uso individual. Após a utilização, higienizar com pano umedecido. Não deve ser imerso em líquido. Descartar em lixo hospitalar.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após o uso e mantenha na embalagem original.

GARANTIA E VALIDADE

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia.

O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.



Uso individual



Higienizar após o uso



Não reprocessar



Descartar em lixo hospitalar

A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto. O educador deve ser utilizado e descartado conforme as instruções desta embalagem.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21 Endereço: Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis – CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS
loja.miotec.com.br

Responsável Técnico: Fabiano Pires Ergoni
CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351690007