

Dispositivo Intracavitário Vaginal para Contração Perineal

# PelviLine

## MAX

### Eletrodo Intracavitário Vaginal para Eletromiografia e Eletroestimulação

- Design retilíneo
- Ideal para anatomias maiores
- Melhor superfície de contato
- Efetivo para tratamento das disfunções do assoalho pélvico

\*VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE  
COM O SEU EQUIPAMENTO



*Para saber mais  
Acesse nossa loja!*

  
**Miotec**  
Conectando Tecnologia  
ao Movimento Humano

**10**  
UNIDADES

O eletrodo intracavitário vaginal PelviLine Max é utilizado para realizar a captação do sinal de eletromiografia e biofeedback ou em situações nas quais se necessite a estimulação muscular da região do perineo. Os eletrodos foram desenvolvidos com alto padrão de qualidade, apresentando um design anatômico onde o fio possui uma proteção flexível em sua base – dificultando danos ao material e garantindo maior liberdade nos movimentos. São confeccionados em plástico ABS e possuem contatos metálicos em aço inoxidável. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado como suprimento dos sistemas de biofeedback de EMG e estimulação muscular, devidamente aprovados de acordo com a norma EN60601-01.

### **INDICAÇÕES DE USO**

Deve ser utilizado em um único paciente, sendo descartado após o uso. É recomendada a utilização do eletrodo em canais de maior anatomia. Não é destinado ao uso simultâneo nos dois canais. Recomenda-se, antes da sua utilização, uma prescrição de um profissional de saúde.

### **CONTRAINDICAÇÕES DE USO**


- Se a embalagem estiver violada;
- Se estiver em pós-cirúrgico;
- Com lesões no tecido;
- Em período menstrual;
- Em pacientes com marca-passo, no caso de estimulação elétrica;
- Caso a paciente sinta algum desconforto, alergia ou irritação na pele.

### **DESCARTE**

Os eletrodos intracavitários PelviLine Max são descartáveis e de uso individual. Os produtos são previamente higienizados com álcool isopropílico e após o uso devem ser descartados em lixo hospitalar. Qualquer tentativa de imersão em líquido pode comprometer o funcionamento do eletrodo.

### **INSTRUÇÕES DE USO**

Certifique-se de que a embalagem está intacta e selada antes de abri-la, e então, rasgue horizontalmente a parte de cima. Abra o “ziplock” da embalagem individual e higienize o eletrodo com algodão e álcool isopropílico (a imersão do eletrodo em qualquer tipo de líquido pode danificar o mesmo). Aplique gel condutor sobre a superfície do eletrodo, facilitando a introdução no canal e a condução do sinal elétrico. Lembre-se de inserir e posicionar o eletrodo com o equipamento desligado. Nunca movimente o eletrodo através dos cabos, utilize a haste que se encontra na parte posterior. A haste não deve ser introduzida no canal, e deverá sempre permanecer do lado externo. As partes metálicas devem ser introduzidas e posicionadas em contato com as paredes laterais do orifício. Lave com água corrente e descarte após o uso.

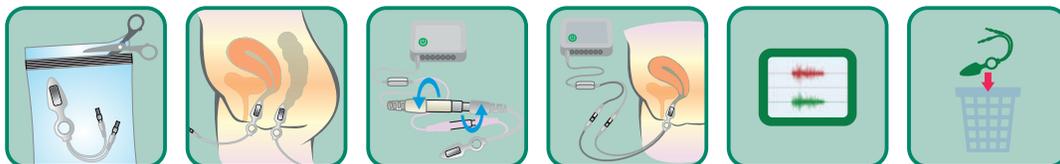

### **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

- Os eletrodos PelviLine Max são acondicionados em embalagens plásticas individuais de 90mm x 160mm;
- As dimensões do eletrodo são: 83mm x 28mm;
- Material ABS de alta resistência mecânica;
- Contatos metálicos em aço inoxidável;
- Peso: 23g.

### **COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS**

Os eletrodos PelviLine Max foram desenvolvidos para utilização junto aos eletromiógrafos da Miotec, podendo ser utilizados em equipamentos de eletroestimulação com certificado de avaliação em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 válido. Consultar a Miotec para verificar a necessidade de cabo adaptador para a utilização do produto.

### **CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO**

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após o uso e mantenha na embalagem original.

### **GARANTIA E VALIDADE**

**Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.**



Uso individual



Higienizar após o uso



Não reprocessar



Descartar em  
lixo hospitalar

A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto. Os eletrodos devem ser utilizados e descartados conforme as instruções desta embalagem.



**Fabricado por:** Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA  
**CNPJ:** 05.245.225/0001-21 **Endereço:** Av. Taquara, 375 / Sala 202  
Bairro Petrópolis – CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS  
loja.miotec.com.br

**Responsável Técnico:** Fabiano Pires Ergoni  
**CREA-RS:** 113407  
**Registro ANVISA:** 80351690007