

PelviAir

Max

Sonda Manométrica Vaginal

- Avaliação e Monitoramento de exercícios do Assoalho Pélvico
- Auxilia nos exercícios de contração e relaxamento do Assoalho Pélvico
- Design Anatômico
- Simples de usar



*Para saber mais
Acesse nossa loja!*



01
Unidade

Sonda PelviAir Vaginal

A sonda manométrica vaginal da Miotec é fabricada utilizando um rigoroso controle de qualidade, constituída de material com excelente resistência e flexibilidade.

Instruções de utilização

- Pressionar a sonda para retirar o ar e conectar ao dispositivo de medição (padrão luer lock);
- Revestir a sonda com preservativo não lubrificado e segurar na base do conector;
- Introduzir a sonda na cavidade vaginal;
- Inflar a sonda lentamente até que o paciente sinta o contato com a parede vaginal;
- Verificar a medida de variação da pressão durante o exercício no dispositivo de medição;
- Liberar a pressão do balão;
- Remover da cavidade vaginal;
- Retirar o preservativo e descartá-lo;
- Desconectar do dispositivo de medição;
- Higienizar e guardar o equipamento.

Armazenamento e conservação

- Não pisar ou apoiar qualquer objeto no envelope.
- O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor excessivo e da luz do sol direta. Recomendamos estocar o produto em temperaturas entre 5 a 30 graus celsius.

Descarte

As sondas PelviAir são de uso individual e não podem ser utilizadas em diferentes pacientes. Após o tratamento, lavar com água corrente e descartar em lixo hospitalar.

Especificações Técnicas

Materiais: Corpo de Poliacetal; Balão de Silicone.

Peso: 41g.

Dimensões: 128mm x 25mm

Informações adicionais consulte manual no interior da embalagem.

Garantia e validade

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente.

No entanto, a garantia precede a validade.

 **Uso individual**

 **Higienizar após o uso**

 **Não reprocessar**

 **Descartar em lixo hospitalar**

A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto.
O educador deve ser utilizado e descartado conforme as instruções desta embalagem.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21. **End:** Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis — CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS.
Resp. Técnico: Fabiano Pires Ergoni CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351690003 – loja.miotec.com.br