

Previni

Sonda manométrica inflável
para exercício de flexibilidade
e propriocepção vaginal

SMV100

- Alongamento dos músculos do assoalho pélvico
- Facilitador para treino expulsivo de parto em gestantes
- Auxilia nos exercícios de contração e relaxamento do assoalho pélvico
- Design anatômico
- Simples de usar



*Para saber mais
Acesse nossa loja!*



01
Unidade



Previni

O Previni é um produto que pode ser inflado progressivamente e de acordo com a tolerância e os objetivos terapêuticos. Auxilia no alongamento dos tecidos muscular e conjuntivo, tanto do canal, quanto do introito vaginal, além de estimular a propriocepção.

Armazenamento

- Manter em local seco e fresco.
- Não expor à luz direta do sol.
- Não expor à calor ou frio excessivo.
- Não expor o produto à poeira ou partículas sólidas em suspensão.
- Manter em temperatura de 5°C à 30°C.
- Guardar as sondas desinfladas.

Conservação

- Não abra as partes do produto.
- Periodicamente inspecionar o balão inflado próximo ao limite especificado, observando alterações de textura que indique laceração do material.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo usuário ou terceiros.
- Todos os reparos devem ser realizados pela Miotec.

Manipulação

- Não pisar no envelope.
- Não apoiar qualquer objeto no envelope.
- Seguir as instruções de uso deste produto.

Conteúdo da embalagem

- 01 Previni
- 01 Manual Impresso - Sonda Previni

Advertências

- Exceder o diâmetro máximo especificado para a sonda pode causar a deformação permanente no material.
- Ao encontrar alterações de textura que indiquem laceração do material, descartar a sonda.
- Perda de pressão excessiva pode indicar desgaste no conector. Sugere-se envio do produto para assistência.

Precauções

- Não utilizar as sondas sem a recomendação e acompanhamento de um profissional da saúde habilitado.
- Não reutilizar em diferentes pacientes, as sondas deverão ser de uso individual (UNICO paciente).
- Lavar as mãos com água e sabão e utilizar luvas de procedimento antes de manipular as sondas.
- Seguir rigorosamente as indicações de limpeza e higienização do produto.
- Utilizar lubrificantes à base de água, caso necessário. Evitar lubrificantes que contenham óleo ou aditivos, sob risco de danificar o balão de silicone.
- Manter as sondas afastadas de objetos cortantes ou perfurantes.
- Não utilizar as sondas em baixo da água.

Garantia e validade

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.

Uso individual

Higienizar após o uso

Não reprocessar

Descartar em lixo hospitalar

A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto. O educador deve ser utilizado e descartado conforme as instruções desta embalagem.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21. **End:** Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis — CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS.
Resp. Técnico: Fabiano Pires Ergoni CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351690003 – loja.miotec.com.br