

Criado e fabricado por



# PelviFit<sup>+</sup> Plus

## Trainer

Educador Perineal  
com Eletrodo Intracavitário



**05 unidades**  
nessa embalagem



**Fácil de visualizar**  
3 ângulos de rotação  
e 2 antenas!



**Melhoria na**  
propriocepção  
muscular vaginal



**Super leve**  
com apenas 23g!

**2**  
FUNÇÕES

Biofeedback visual  
ativo e passivo da  
contração muscular



**Para saber mais**  
Acesse nossa loja!

O PelviFit Trainer Plus é um dispositivo desenvolvido para auxiliar no fortalecimento e na conscientização da musculatura do assoalho pélvico. Seu design anatômico e sistema de antena extensora permitem um uso confortável, seguro e eficaz durante os exercícios. Produzido em plástico ABS de alta qualidade e contatos metálicos em aço inoxidável, o PelviFit Trainer Plus oferece praticidade e durabilidade. O produto atende aos requisitos da ANVISA e foi desenvolvido para uso em programas de treinamento e reabilitação do assoalho pélvico.

### INDICAÇÕES DE USO ✓

Deve ser utilizado exclusivamente em um único paciente, podendo ser reutilizado por até 10 sessões, desde que higienizado adequadamente entre os usos conforme instruções deste manual. Não deve ser utilizado no canal anal. Não é destinado ao uso simultâneo nos dois canais. Recomenda-se, antes da sua utilização, uma prescrição de um profissional de saúde.

### CONTRAINDICAÇÕES DE USO ✗

- Se esta embalagem estiver violada;
- Se a paciente estiver em período pós-cirúrgico;
- Se a paciente apresentar lesões no tecido;
- Se a paciente estiver em período menstrual;
- Se a paciente utilizar marca-passo, em caso de uso deste dispositivo para estimulação elétrica;
- Se a paciente apresentar feridas, irritações, alergias, secreções ou sinais de infecção na região de aplicação;
- Se a paciente demonstrar reação adversa ou desconforto incomum, **interromper o uso imediatamente.**

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- O educador PelviFit Trainer Plus possui três partes: corpo do educador, antena e anel de base para manuseio;
- Design anatômico;
- As dimensões do educador são: **97,5mm x 22mm**
- A dimensão da antena é de: **106,5mm**
- Material ABS de alta resistência mecânica;
- Contatos metálicos em aço inoxidável;
- Peso: 23g.

### UTILIZAÇÃO

Certifique-se de que esta embalagem está intacta e selada antes de abri-la. Posicionar a paciente sentada ou deitada e solicitar que a mesma mantenha o corpo relaxado. Utilizar gel lubrificante se necessário. Introduzir o educador segurando pelo anel de base. O anel de base não deve ser introduzido na vagina e a antena deve estar visível para a paciente. Exercitar e observar as contrações. Retirar o educador segurando-o pelo anel. Observar o movimento da antena à medida que as contrações são realizadas. O movimento da antena para baixo indica que a contração está correta. A ausência de movimento da antena pode indicar que o posicionamento do educador está incorreto ou que a musculatura pélvica está frágil, exigindo um tratamento mais específico e de fortalecimento. Com o eletromiógrafo, observar na tela do software a resposta elétrica do músculo intravaginal, junto ao biofeedback visual através da antena. Com o eletroestimulador, estimular a musculatura através das ondas elétricas e observar as contrações juntamente ao biofeedback visual através da antena.


### INSTRUÇÃO PARA REPROCESSAMENTO

Após cada uso, com luvas de procedimento descartáveis, remover resíduos com papel toalha seco e **friccionar toda a superfície do eletrodo com gaze ou pano descartável embebido em álcool 70%**, garantindo contato por no mínimo 30 segundos. Deixar secar ao ar. Armazenar em recipiente limpo e seco identificado com nome do paciente e número de reuso.

### MONTAGEM DA PELVIFIT TRAINER PLUS



### OBSERVE A FIGURA ABAIXO:

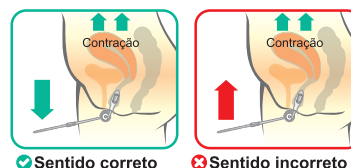

### COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Os educadores intracavitários vaginais PelviFit Trainer Plus foram desenvolvidos para utilização junto aos eletromiógrafos da Miotec, podendo ser utilizados em equipamentos de eletroestimulação com certificado de avaliação em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 válido. Consultar a Miotec para verificar a necessidade de cabo adaptador para a utilização do produto.

### GARANTIA E VALIDADE

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante apresentação de nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade. Este produto foi validado para reutilização no mesmo paciente por até 10 ciclos, desde que seguidas rigorosamente as orientações de higienização e armazenamento.

### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após cada uso, armazene em embalagem limpa e seca, **identificada com nome do paciente e número de reuso.**

### DESCARTE

Os educadores PelviFit Trainer Plus são de uso individual e devem ser descartados após 10 utilizações ou antes, caso apresentem desgaste, danos ou falha na higienização. Os produtos são previamente higienizados com álcool isopropílico e após o uso devem ser descartados em lixo hospitalar.

1 Uso individual

Higienizar após o uso

Produto passível de reprocessamento

Descartar em lixo hospitalar

A MIOTEC NÃO SE RESPONSABILIZA PELO USO INDEVIDO DESTA PRODUTO.  
O EDUCADOR DEVE SER UTILIZADO E DESCARTADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DESTA EMBALAGEM.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA  
CNPJ: 05.245.225/0001-21 Endereço: Av. Taquara, 375 / Sala 202  
Bairro Petrópolis – CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS  
Responsável Técnico: Fabiano Pires Ergoni  
CREA-RS: 113407 Registro ANVISA: 80351690007  
[loja.miotec.com.br](http://loja.miotec.com.br)

