

# PelviAir

Lite

## Sonda Manométrica Anal

- Avaliação e Monitoramento de exercícios do Assoalho Pélvico
- Auxilia nos exercícios de contração e relaxamento do Assoalho Pélvico
- Design Anatômico
- Simples de usar



*Para saber mais  
Acesse nossa loja!*



**01**  
**Unidade**

## Sonda PelviAir Anal

A sonda manométrica anal da Miotec é fabricada utilizando um rigoroso controle de qualidade, constituída de material com excelente resistência e flexibilidade.

### Instruções de utilização

- Dispositivo de medição (padrão luer lock);
- Ajustar a trava de profundidade de inserção conforme desejado
- Revestir a sonda com preservativo não lubrificado e segurar na base do conector;
- Introduzir a sonda na cavidade anal;
- Inflar a sonda lentamente até que o paciente sinta o contato com a parede anal;
- Verificar a medida de variação da pressão durante o exercício no dispositivo de medição;
- Liberar a pressão do balão;
- Remover da cavidade anal;
- Retirar o preservativo e descartá-lo;
- Desconectar do dispositivo de medição;
- Higienizar e guardar o equipamento.

### Armazenamento e conservação

- Não pisar ou apoiar qualquer objeto no envelope.
- O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor excessivo e da luz do sol direta. Recomendamos estocar o produto em temperaturas entre 5 a 30 graus celsius.

### Descarte

As sondas PelviAir são de uso único. Após a utilização, lavar com água corrente e descartar em lixo hospitalar.

### Especificações Técnicas

**Materiais:** Corpo de Poliacetal; Balão de Silicone.

**Peso:** 16g.

**Dimensões:** 85mm x 12mm

**Informações adicionais consulte manual no interior da embalagem.**

### Garantia e validade

**Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.**

Uso individual

Higienizar após o uso

Não reprocessar

Descartar em  
lixo hospitalar

A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto.  
O educador deve ser utilizado e descartado conforme as instruções desta embalagem.



**Fabricado por:** Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA  
**CNPJ:** 05.245.225/0001-21. **End:** Av. Taquara, 375 / Sala 202  
Bairro Petrópolis — CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS.  
**Resp. Técnico:** Fabiano Pires Ergoni CREA-RS: 113407  
**Registro ANVISA:** 80351690003 – [loja.miotec.com.br](http://loja.miotec.com.br)