

Saiba mais sobre a PelviFit Trainer Pro

A PelviFit Trainer PRO é projetada para auxiliar nos exercícios de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico por meio de técnicas de contração, relaxamento e sustentação. Devido à possibilidade de utilizar uma combinação de pesos internos, é possível aumentar a dificuldade dos exercícios.

Seu funcionamento é simples e prático: primeiramente, decida qual peso será inserido dentro do corpo principal. Faça a montagem, insira o dispositivo no canal vaginal e, em seguida, realize movimentos de contração e relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Durante

as contrações, é possível observar o movimento angular da antena que está anexada ao corpo do produto. Aumente gradativamente os pesos para incrementar os exercícios.

A movimentação da antena em direção ao joelho indica que a contração está correta e permite que a usuária saiba que seus exercícios estão sendo realizados de forma efetiva.

O fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico é importante, pois ele permite a sustentação dos órgãos pélvicos, como a bexiga, o útero e o reto, desempenhando

também um papel importante no controle da continência urinária e fecal.

Além disso, esses exercícios contribuem para o **prazer sexual**.

A prática de exercitar esses músculos é particularmente relevante para mulheres, especialmente após a gravidez e o parto, uma vez que esses músculos tendem a perder sua tonicidade. Pessoas de todas as idades podem enfrentar problemas como incontinência urinária, disfunção sexual ou outros problemas relacionados ao assoalho pélvico.

Informações Importantes

Consulte uma fisioterapeuta pélvica para obter melhores resultados. **Higienize o produto antes de utilizá-lo com água e sabão neutro. Não utilize em caso de desconforto** e nem se estiver com algum tipo machucado ou infecção.

Conservação e Armazenamento

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C, higienize após cada uso com álcool 70% e mantenha na embalagem original.

Garantia e validade

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. Validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.

1 Uso individual

Higienizar após o uso

Produto passível de reprocessamento

Descartar em lixo hospitalar

FABRICADO POR:

Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21.

ENDEREÇO:


Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis - CEP 90440-210
Porto Alegre / RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Fabiano Pires Ergoni
CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351490007

www.miotec.com.br

miotec@miotec.com.br

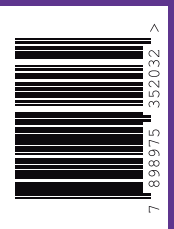

PelviFit Trainer Pro



Aponte a Câmera do celular para o QR Code e saiba mais sobre a PelviFit Trainer Pro

www.miotec.com.br