

Criado e fabricado por



PelviFit

Trainer

Comfort

Educador Perineal



**MATERIAL EM SILICONE
À PROVA D'ÁGUA**

**Cada educador acompanha
uma bag de veludo!**

Perfeito para você presentear
e surpreender suas pacientes!



Fácil de visualizar
3 ângulos de rotação
e 2 antenas!



Monitoramento
da evolução
do tratamento



Super leve
com apenas 30g!

05 Unidades
nessa embalagem



Para saber mais
Acesse nossa loja!

O PelviFit Trainer Comfort é um dispositivo desenvolvido para auxiliar no fortalecimento e na conscientização da musculatura do assoalho pélvico. Seu design anatômico e sistema de antena extensora permitem um uso confortável, seguro e eficaz durante os exercícios. Produzido em silicone à prova d'água de alta qualidade, o PelviFit Trainer Comfort oferece praticidade e durabilidade. O produto atende aos requisitos da ANVISA e foi desenvolvido para uso em programas de treinamento e reabilitação do assoalho pélvico.

INDICAÇÕES DE USO ✓

Deve ser utilizado exclusivamente em um único paciente, podendo ser reutilizado por até 10 sessões, desde que higienizado adequadamente entre os usos conforme instruções deste manual. Não deve ser utilizado no canal anal. Não é destinado ao uso simultâneo nos dois canais. Recomenda-se, antes da sua utilização, uma prescrição de um profissional de saúde.

CONTRAINDICAÇÕES DE USO ✗

- Se esta embalagem estiver violada;
- Se a paciente estiver em período pós-cirúrgico;
- Se a paciente apresentar lesões no tecido;
- Se a paciente estiver em período menstrual;
- Se a paciente apresentar feridas, irritações, alergias, secreções ou sinais de infecção na região de aplicação;
- Se a paciente demonstrar reação adversa ou desconforto incomum, **interromper o uso imediatamente.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- O educador PelviFit Trainer Comfort possui três partes: corpo do educador, antena e anel de base para manuseio;
- Design antômico;
- As dimensões do educador são: **97,5mm x 22mm;**
- A dimensão da antena é de: **106,5mm;**
- Material em silicone à prova d'água;
- Peso: 20g.

UTILIZAÇÃO

Certifique-se de que esta embalagem está intacta e selada antes de abri-la. Posicionar a paciente sentada ou deitada e solicitar que a mesma mantenha o corpo relaxado. Utilizar gel lubrificante se necessário. Introduzir o educador segurando pelo anel de base. O anel de base não deve ser introduzido na vagina e a antena deve estar visível para a paciente. Exercitar e observar as contrações. Retirar o educador segurando-o pelo anel. Observar o movimento da antena à medida que as contrações são realizadas. O movimento da antena para baixo indica que a contração está correta. A ausência de movimento da antena pode indicar que o posicionamento do educador está incorreto ou que a musculatura pélvica está frágil, exigindo um tratamento mais específico e de fortalecimento.


INSTRUÇÃO PARA REPROCESSAMENTO

Após cada uso, com luvas de procedimento descartáveis, remover resíduos com papel toalha seco e **friccionar toda a superfície do eletrodo com gaze ou pano descartável embebido em álcool 70%**, garantindo contato por no mínimo 30 segundos. Deixar secar ao ar. Armazenar em recipiente limpo e seco identificado com nome do paciente e número de reuso.

MONTAGEM DA PELVIFIT TRAINER COMFORT



OBSERVE A FIGURA ABAIXO:

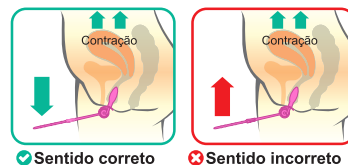

GARANTIA E VALIDADE

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante apresentação de nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade. Este produto foi validado para reutilização no mesmo paciente por até 10 ciclos, desde que seguidas rigorosamente as orientações de higienização e armazenamento.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após cada uso, armazene em embalagem limpa e seca, **identificada com nome do paciente e número de reuso.**

DESCARTE

Os educadores PelviFit Trainer Comfort são de uso individual e devem ser descartados após 10 utilizações ou antes, caso apresentem desgaste, danos ou falha na higienização. Os produtos são previamente higienizados com álcool isopropílico e após o uso devem ser descartados em lixo hospitalar.

1 Uso individual

Higienizar após o uso


Produto passível de reprocessamento

Descartar em lixo hospitalar

A MIOTEC NÃO SE RESPONSABILIZA PELO USO INDEVIDO DESTES PRODUTOS. O EDUCADOR DEVE SER UTILIZADO E DESCARTADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DESTA EMBALAGEM.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21 **Endereço:** Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis – CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS
Responsável Técnico: Fabiano Pires Ergoni
CREA-RS: 113407 **Registro ANVISA:** 80351690007
loja.miotec.com.br

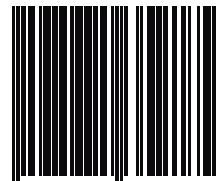

7 898975 352179 >