

Dispositivo Educador Vaginal

PelviFit

Trainer

Comfort


Educador Perineal

Fácil de visualizar - Com 3 ângulos de rotação e 2 antenas

Monitoramento da evolução do tratamento

Super leve - com apenas 30g

Material em silicone à prova d'água

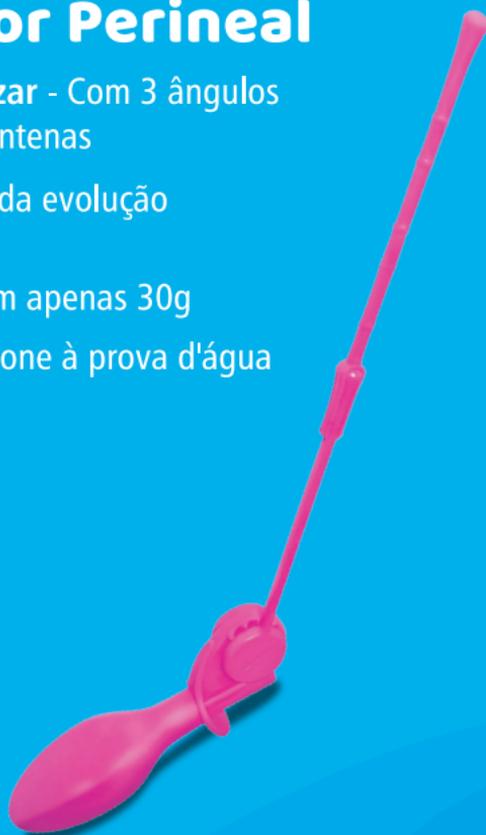

*Para saber mais
Acesse nossa loja!*


Miotec
Conectando Tecnologia
ao Movimento Humano

01
UNIDADE

INDICAÇÕES DE USO

Recomendado para mulheres que desejam melhorar a função do assoalho pélvico. Utilizado para visualizar se a musculatura do assoalho pélvico está sendo contraída de forma correta através do movimento da antena conectada ao educador.

CONTRAINDICAÇÕES DE USO

Não utilizar se a embalagem estiver violada, em pacientes gestantes, com lesões no tecido do assoalho pélvico ou em período menstrual. Não utilizar no ânus ou sem a recomendação e o acompanhamento de um profissional habilitado. Não utilizar caso a paciente sinta algum desconforto, alergia ou irritação na pele.


PREPARAÇÃO

Verificar se a embalagem está intacta antes de abri-la, recortar a embalagem de esterilização e higienizar o produto. Posicionar a paciente sentada ou deitada. Utilizar gel lubrificante se necessário.

HIGIENIZAÇÃO

Limpar com água e sabão ou detergente enzimático. Secar com toalha ou pano seco.


MONTAGEM DO PELVIFIT TRAINER COMFORT

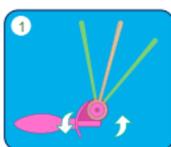

Selecionar o ângulo escolhido



Conectar a antena ao anel fixador

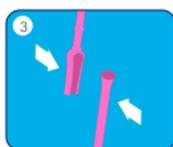

Conectar a haste extensora da antena

UTILIZAÇÃO

Solicitar à paciente que mantenha o corpo relaxado. Introduzir o educador segurando pelo anel de base. O anel de base não deve ser introduzido na vagina e a antena deve estar visível para a paciente. Exercitar e observar as contrações. Retirar o educador segurando-o pelo anel.

OBSERVANDO A CONTRAÇÃO

Observar o movimento da antena à medida que as contrações são realizadas. O movimento da antena para baixo indica que a contração está correta. A ausência de movimento da antena pode indicar que o posicionamento do educador está incorreto ou que a musculatura pélvica está frágil, exigindo um tratamento mais específico e de fortalecimento.

DESCARTE

Os educadores PelviFit Trainer Comfort são de uso individual. Após a utilização, higienizar com pano umedecido e armazenar. Pode ser imerso em líquido. Caso deseje descartar utilize lixo hospitalar.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após o uso e mantenha na embalagem original.

GARANTIA E VALIDADE

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.

Uso individual

Higienizar após o uso

Não reprocessar

Descartar em lixo hospitalar



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21. End: Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis — CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS.
Resp. Técnico: Fabiano Pires Ergoni CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351690003 – loja.miotec.com.br