


*Dispositivos intracavitários vaginais/anaís
para contração perineal

PACK ADVANCED

Tecnologia Premium para resultados superiores!

PelviFit Trainer | PelviFit Max | PelviFit Lite
PelviLine Lite | PelviLine Max

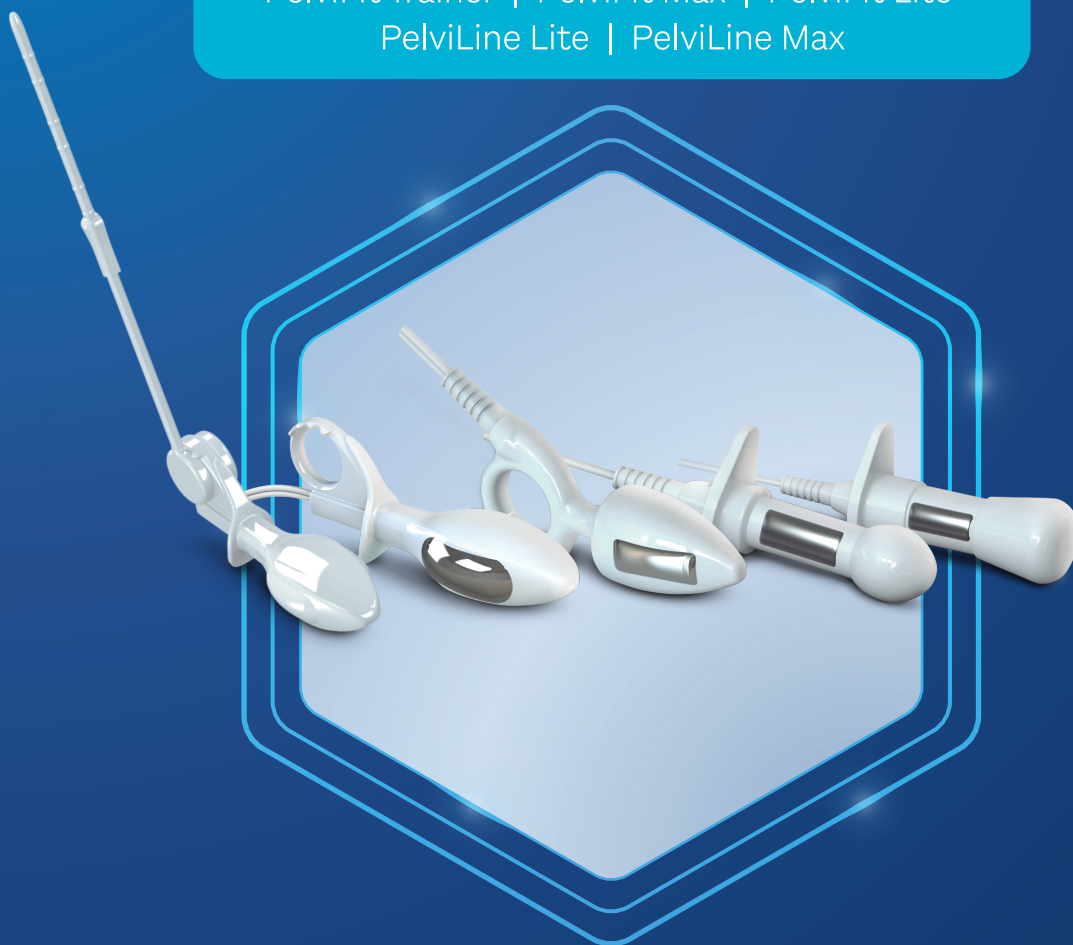

*VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE COM O SEU EQUIPAMENTO

Lucratividade e versatilidade: pack com **10 unidades variadas**, pronto para atender todas as necessidades de seus pacientes e tratamentos!



Para saber mais
Acesse nossa loja!
loja.miotec.com.br

 **Miotec**

Parabéns, você está adquirindo o Pack Advanced da Miotec, com 10 unidades variadas de dispositivos intracavitários, sendo eles:

2 unidades do educador PelviFit Trainer
Formato anatômico com Biofeedback visual.

2 unidades do eletrodo PelviFit Max
Formato anatômico e dimensões que permitem um encaixe seguro.

2 unidades do eletrodo PelviFit Lite
Formato anatômico que proporciona encaixe ergonômico.

2 unidades do eletrodo PelviLine Lite
Formato retilíneo e tamanho reduzido para um maior conforto nos exames.

2 unidades do eletrodo PelviLine Max
Formato retilíneo e dimensões para se adequar às diferentes anatomias.

ATENÇÃO: Todos os dispositivos deste Pack são destinados a melhoria das funções da musculatura do assoalho pélvico, e devem ser utilizados de acordo com a orientação e determinação do fisioterapeuta responsável pelo tratamento adotado, que devem ser selecionados de acordo com a necessidade de cada paciente.

Os dispositivos são desenvolvidos com alto padrão de qualidade, sendo confeccionados com plástico ABS e contatos metálicos em aço inoxidável.



Para mais informações sobre cada um dos produtos, consulte a página de manuais da Miotec:

www.miotec.com.br/manuais



Para adquirir online este e outros produtos Miotec, acesse nossa loja virtual:

loja.miotec.com.br

INDICAÇÕES DE USO

Cada dispositivo deve ser utilizado em um único paciente, podendo ser reutilizado por até 10 sessões, desde que higienizado adequadamente entre os usos conforme instruções deste manual. Verificar a utilização correta para cada eletrodo ou educador pélvico em seus respectivos manuais. Recomenda-se, antes da sua utilização, uma prescrição de um profissional de saúde.

COMPATIBILIDADE COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Os eletrodos intracavitários foram desenvolvidos para utilização junto aos eletromiógrafos da Miotec, podendo ser utilizados em equipamentos de eletroestimulação com certificado de avaliação em conformidade com as normas ABNT NBR IEC 60601-1 válido. Consultar a Miotec para verificar a necessidade de cabo adaptador para a utilização do produto.

GARANTIA E VALIDADE

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante apresentação de nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade. Este produto foi validado para reutilização no mesmo paciente por até 10 ciclos, desde que seguidas rigorosamente as orientações de higienização e armazenamento.

INSTRUÇÃO PARA REPROCESSAMENTO

Após cada uso, com luvas de procedimento descartáveis, remover resíduos com papel toalha seco e **friccionar toda a superfície do eletrodo com gaze ou pano descartável embebido em álcool 70%**, garantindo contato por no mínimo 30 segundos. Deixar secar ao ar. Armazenar em recipiente limpo e seco identificado com nome do paciente e número de reuso.

Uso individual

Higienizar após o uso


Produto passível de reprocessamento

Descartar em lixo hospitalar

A MIOTEC NÃO SE RESPONSABILIZA PELO USO INDEVIDO DESTE PRODUTO.
O EDUCADOR DEVE SER UTILIZADO E DESCARTADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DESTA EMBALAGEM.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21 **Endereço:** Av. Taquara, 375 / Sala 202
Bairro Petrópolis – CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS
Responsável Técnico: Fabiano Pires Ergoni
CREA-RS: 113407 **Registro ANVISA:** 80351690007
loja.miotec.com.br

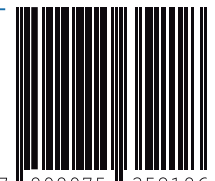

7 898975 352186 >